

### Bemærk venligst følgende vedr. Robi Comb Pro:

1. Folk med en specielt følsom hovedbund kan nogle gange mærke at det "prikker" lidt, når de kører ROBI COMB PRO hen over hovedbunden. Dette er ikke farligt, da kammen kun får strøm fra et 1,5 volt batteri.
2. Små børn bør kun bruge ROBI COMB PRO under vejledning af en voksen.
3. ROBI COMB PRO er følsom over for fugt, og kan derfor ikke bruges i fugtigt hår. Ligeledes bør den opbevares et tørt sted.
4. Rens kun kammen efter de ovennævnte instruktioner.
5. ROBI COMB PRO er udviklet til brug udelukkende på hovedhår.
6. ROBI COMB PRO bør ikke bruges af folk der lider af sygdomme der kan forværres ved kontakten med et elektronisk apparat, selv om kammen kun afgiver en meget begrænset mængde strøm. Det samme gælder for personer der bruger pacemaker. Der er aldrig blevet rapporteret nogen bivirkninger ved brugen af ROBI COMB PRO i de 15 år den har været på markedet.
7. Du bør ikke bruge kammen i områder, hvor der er sår.

### Fejlsøgning

Der høres ikke nogen lyd når ROBI COMB PRO er tændt:

De mest sandsynlige årsager er, at kammen er fugtig, en af kammens tænder er bukket, så der er kontakt mellem to tænder, der sidder noget i klemme mellem to tænder, eller at der ikke er mere strøm på batteriet. Problemet løses ved enten at rense kammen som tidligere beskrevet og lade den tørre helt, skifte batteriet eller i tilfælde af at en af tænderne er bøjet, rette den forsigtigt ud.

Hvis intet af det ovenstående løser problemet, prøv da at fjerne kammens tænder helt og tænd så igen for den. Hvis der stadig ikke kommer nogen lyd, bedes forhandleren kontaktes for evt. reparation eller ombytning.



**LiceGuard Luseæg Fjerner Shampoo** er en ikke-giftig, pesticidfri shampoo der 3-dobler antallet af luseæg, der kan kæmmes ud af håret. Shampooen opløser limen der fæstner luseæggene til håret.

**Instruktion:** Massér shampooen ind i vådt hår og lad det sidde i 2-5 minutter. Skyl derefter håret og red det våde hår igennem med LiceGuard Luseæg kam.



**LiceGuard Luseæg kam** er specielt designet med hensyn til børn. Rundede uskarpe hjørner forhindrer at hovedbunden generes og skræbes. Tænderne er lavet af en særlig holdbar og stærk rustfri stål. Håndtaget ligger godt i hånden. Kammen kan koges for optimal hygiejne. Der ydes livslang garanti på kammen.

For det bedste resultat anbefales det at kæmme håret efter brug af LiceGuard Luseæg fjerner shampoo.



**LiceGuard Luse Forebyggelses Spray** er en nem og hurtig måde at holde lus væk på. En behandling holder i 24 timer og yder beskyttelse mod angreb af lus. Lavet af naturlige ingredienser. En flaske varer i 60 dage. Sikker at bruge på daglig basis.

**Instruktion:** Påføres om morgenen. Rystes før brug. Hold flasken ca. 15 cm fra håret og spray på rent hår – tørt eller vådt. Red håret igennem med en almindelig kam. Gentag hvert døgn. Opbevares i stuetemperatur. Bruges daglig for konstant beskyttelse. Kan også bruges i huer, hatte, hjelme og på toklæder.

# Brugsanvisning LiceGuard® Lusebekæmpelses serie Ikke-giftig og effektiv

En dokumenteret serie der opdager, bekæmper og beskytter mod angreb af lus



LiceGuard Robi Comb Pro  
- OPDAGER OG DRÆBER LUS OG NYMFER

LiceGuard Luseæg fjerner Shampoo  
- OPLØSER LIM DER HOLDER LUSEÆG FAST

LiceGuard Luseæg kam  
- FJERNER ÆG, NYMFER OG LUS

LiceGuard Luse Forebyggelses Spray  
- BESKYTTER MOD LUSEANGREB

Importør, distributør og forhandler:

WorldCare

Telefon: +45 51 90 33 15

E-mail: [info@worldcare.dk](mailto:info@worldcare.dk)

Web: [www.worldcare.dk](http://www.worldcare.dk)



# ROBI COMB PRO

- et produkt der finder og fjerner hovedlus uden brug af kemikalier

Tillykke med dit valg af dette innovative produkt til lusebekæmpelse. Liceguard ROBI COMB PRO konstaterer og dræber lus, når de kommer i kontakt med tænderne på den elektroniske kam. Takket været ROBI COMB PROs patenterede design, skades kun lusene og den er helt ufarlig at bruge for både voksne og børn fra 3 år og op.

Howdan virker ROBI COMB PRO?

Liceguard ROBI COMB PRO drives af et enkelt AA batteri og består af en kam med metaltænder. Når en lus bliver fanget mellem to af kammens tænder, afgives en lille mængde strøm, så den passerer gennem lusens og dræber den. Tænderne på kammen er isoleret, så du undgår at mærke noget til den strøm der passerer gennem lusens. ROBI COMB PRO sælges i millionvis i over 30 lande verden over.

For yderligere bekæmpelse af lus anbefales LiceGuard's øvrige produkter: Luseæg fjerner Shampoo, Luseæg kam, Luse Forebyggelses Spray.

**Garanti:** Arr Health / LiceGuard gør sit yderste for at sikre at alle produkter er fremstillet uden fejl. Men i tilfælde af defekt på funktion eller materiale, garanterer vi at reparere eller erstatte produktet afhængig af fejlen indenfor den 2 årige reklamationsperiode. Skulle der være en defekt på varen bedes du henvende dig til forhandleren med en kopi af fakturaen/bonen. Garantien dækker ikke ved betjeningsfejl, mislykkede forsøg på at følge brugsvejledningen, bortkomst, modifikationer eller misbrug fra brugerens side.



Figur 1



Figur 2



Figur 3



Figur 4



Figur 5



Figur 6



Figur 7

## Instruktion i brugen af ROBI COMB PRO

1. Placer et nyt AA batteri (ikke inkluderet) i din ROBI COMB PRO. Dette gøres ved at trykke ind på det markerede område på siderne af kammen og trække den bagerste del af kammen væk fra resten af enheden. Det kan de første par gange være lidt svært at få delene adskilt, men det bliver nemmere efter et par gange. Se figur 1.

2. Kan benyttes i alle typer af hår.

3. Liceguard ROBI COMB PRO er kun til brug i helt tørt hår, i modsætning til mange af de andre produkter der er på markedet. Hvis håret er vådt når kammen bruges, vil der blive skabt kontakt mellem kammens tænder og den vil derfor ikke fungere efter hensigten.

4. Du kan med fordel rede håret igennem med en almindelig børste før ROBI COMB PRO benyttes.

5. Tryk kontakten på fronten af din ROBI COMB PRO frem, så den står i én af de 2 positioner. Så længe kammen er tændt, vil du høre en summende lyd. Den angiver at kammen fungerer efter hensigten. Se figur 2.

6. Hold din ROBI COMB PRO så den flade side holder en vinkel på 45 grader i forhold til det område der skal kæmmes. Siden med kontakten skal vende opad. Se figur 3.

I position 1: (Afslojer luseangreb) Maskinen afgiver en tone indtil den fanger en lus og dræber den, på dette tidspunkt ophører tonen. Brøst kammen med den tilhørende børste. Se figur 4 og 5. Så snart at kammen er børstet ren, starter tonen igen og du kan forsætte med at kæmme. På denne måde kan du hurtigt opdage et angreb af lus.

I position 2: (hurtig elimination af lus) Har forsætter kammen med at afgive en tone selv efter den har stødt på en lus. Tonen ændrer sig dog, således at man kan høre at en lus er fundet og elimineret. Når kammen er fyldt godt op vil tonen ophøre og man kan rense kammen med den tilhørende børste for døde lus, skæl m.m. Tonen vil høres igen når kammen er renses. Forsæt derefter kæmningen.

7. Hvis tonen ikke vender tilbage efter en hurtig børstning af kammen, bedes du klikke topstykket med tænderne af og rense mundstykket grundigt. Se figur 6. Bemærk at metalstykket med tænderne kan tages helt ud af isolyster. Se figur 7. Brug evt. en klud med isopropyl alkohol. Når det er gjort skal kammen tørres grundigt inden brug igen. Brug evt. en hårtørret. Se fejlsøgning hvis der stadig er problemer.

8. Du bør bruge mindst 5-10 minutter på en behandling, for at sikre at der ikke er nogen områder der ikke har været kæmmet. Husk at slukke din ROBI COMB PRO efter brug.

9. Skulle du opleve at nogle lus stadig bevæger sig efter at du har kæmmet dem ud af håret, skal du ikke fortvivle. Ofte dør de lige med det samme, men du vil evt. kunne opleve at lusene stadig spræller og spjætter, ligesom vi kender det med en høne, der stadig løber rundt selvom den lige har fået hovedet hugget af. Dør de ikke lige med det samme vil døden indtræffe senest 2 timer efter kæmningen uanset om lusene stadig sidder i håret eller ej - 2 timer hvor de selvfølgelig ikke kan lægge flere æg.

10. Hvis du skal bruge din ROBI COMB PRO til mere end en person, bør den rengøres grundigt mellem hver behandling. Dette gøres som omtalt under punkt 7.

11. Liceguard ROBI COMB PRO er speciel effektiv overfor voksne lus og større nymfer. Det betyder, at det er vigtigt at forsætte behandlingen ca. hver anden dag indtil alle tilbageværende æg er klækket. Det vil normalt tage ca. 10-14 dage. Hvis ROBI COMB PRO bruges efter forskrifterne vil lusene aldrig nå at blive kønsmodne, og kan derfor ikke formere sig. Ved jævnlig brug af din ROBI COMB PRO, opdager du også hurtigt, hvis du eller dit barn får lus igen. Det ses ofte, at børn får lus flere gange over en kort periode, da ikke alle forældre er lige vedholdende med at kæmme i hele den nødvendige periode. ROBI COMB PRO gør det meget nemmere at holde problemet nede.

### Pakken indeholder følgende:

1 stk. ROBI COMB PRO  
1 stk. rensesbørste med forstørrelsesglas  
Brugsanvisning

**Bemærk** at du ikke må smide din Robi Comb Pro i skraldespanden. Aflever den venligst på genbrugsstationen

